



MedizinTechnik

Deutsch

Gebrauchsanweisung

ATMOS[®] Chair 21 P



GA1DE.130201.0

2018-03 Index: 13

1.0	Einleitung.....	3
1.1	Hinweise zur Gebrauchsanweisung.....	3
1.2	Funktion	4
1.3	Zweckbestimmung	4
1.4	Lieferumfang	5
1.5	Transport und Lagerung	5
1.6	Erklärung der Bildzeichen	5
2.0	Sicherheitshinweise	6
3.0	Aufstellung und Inbetriebnahme.....	7
3.1	Bedienungselemente	7
3.2	Befestigung des Patientenstuhls.....	7
3.3	Montage Fußstütze	7
3.4	Befestigung der Rückenlehne.....	8
3.5	Einstellen der Kopfstütze	8
3.6	Entfernen der Kopfstütze	8
4.0	Bedienung	9
4.1	Patient positionieren	9
4.2	Einstellen der Sitzhöhe	9
4.3	Drehen des Stuhloberteiles.....	9
4.4	Verstellen der Rückenlehne	9
5.0	Reinigungs- und Pflegehinweise.....	10
5.1	Grundsätzliches zu Reinigung und Desinfektion	10
5.2	Reinigung und Desinfektion der Geräteoberfläche und Polster	10
5.3	Empfohlene Oberflächendesinfektionsmittel.....	10
5.4	Empfohlene Polsterdesinfektionsmittel.....	10
6.0	Wartung und Service	11
6.1	Wiederkehrende Prüfungen.....	11
6.2	Gerät einsenden	11
7.0	Behebung von Funktionsstörungen	11
8.0	Optionen und Ersatzteile.....	12
8.1	Optionen	12
8.2	Ersatzteile	12
9.0	Technische Daten	13
10.0	Überprüfung / Entsorgung	14
10.1	Überprüfung von ATMOS Geräten.....	14
10.2	Entsorgung.....	14

ATMOS

MedizinTechnik GmbH & Co. KG
 Ludwig-Kegel-Str.16
 79853 Lenzkirch
 Deutschland

Telefon: + 49 7653 689-0
 Fax:
 + 49 7653 689-190
 + 49 7653 689-292 (Service Center)
 E-Mail: atmos@atmosmed.de
 Internet: <http://www.atmosmed.de>

1.1 Hinweise zur Gebrauchsanweisung



Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise, wie Sie Ihren ATMOS® Chair 21 P sicher, sachgerecht und effektiv betreiben. Ihre Lektüre hilft Gefahren zu vermeiden, sowie Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern. Das erhöht u.a. die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Gerätes.

Sie dient nicht nur zum An-/ Einlernen von Bedienpersonen, sondern ist auch als Nachschlagewerk gedacht. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von ATMOS.

Die Gebrauchsanweisung muss stets in Gerätenähe verfügbar sein.



Pflege und sicherheitstechnische Kontrollen, zusammen mit der fachgerechten Anwendung, gewährleisten die Betriebssicherheit und Einsatzfähigkeit des ATMOS® Chair 21 P und sind deshalb, neben der regelmäßigen Reinigung, unerlässlich.

Reparaturarbeiten und sicherheitstechnische Kontrollen dürfen nur von einem durch ATMOS autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Durch Verwendung von Original-Ersatzteilen haben Sie die Gewähr, dass die Betriebssicherheit, Einsatzfähigkeit und der Wert Ihres ATMOS® Chair 21 P erhalten bleiben.



- Der Patientenstuhl ATMOS® Chair 21 P trägt die CE-Kennzeichnung CE gemäß der EU-Richtlinie des Rates über Medizinprodukte 93/42/EWG Richtlinie 2007/47/EG Stand: 05.09.07 und erfüllt die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I dieser Richtlinie.
- Das Produkt ATMOS® Chair 21 P entspricht allen anwendbaren Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten („RoHS“).
- Die Konformitätserklärungen und unsere AGBs finden Sie im Internet unter www.atmosmed.com.
- Das bei ATMOS angewandte Qualitätsmanagementsystem ist nach der internationalen Norm EN ISO 13485 zertifiziert.
- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme bitte das Kapitel 2.0 „Sicherheitshinweise“, um eventuelle Gefahrensituationen zu vermeiden.

Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgende Geräte:

ATMOS® Chair 21 P REF 503.0730.0

Farbe: weiß-taubenblau

ATMOS® Chair 21 P REF 503.0700.0

Farbe: basic-taubenblau

Dieses Dokument bitte zum späteren Gebrauch aufbewahren!



1.2 Funktion

- Der Patientenstuhl ATMOS® Chair 21 P ermöglicht eine entspannte und für den Untersucher optimale Körperhaltung des Patienten (sitzend oder halb liegend).
- Der ATMOS® Chair 21 P ist mit einer mechanischen Höhenverstellung ausgestattet. Die Sitzhöhe lässt sich von 46 bis 66 cm variieren.
- Das Stuhloberteil ist um 360° drehbar und lässt sich durch eine Feststellbremse in jeder gewünschten Höhen- und Drehposition arretieren.
- Die Neigung der schulterhohen Rückenlehne kann stufenlos von ca. -5° Vorneigung bis 45° Rücklage eingestellt werden.

1.3 Zweckbestimmung

Name: ATMOS® Chair 21 P

Hauptfunktion: Der Patientenstuhl erlaubt die untersuchungsgerechte Positionierung des Patienten sowohl in der Höhe, als auch in der Lage (sitzend oder halbliegend).

Med. Indikation / Anwendung: Positionierung des Patienten bei Standard HNO Untersuchungen und / oder Therapie.

Spezifikation der Hauptfunktion: Nahtlose Sitzfläche aus abrieb- und reißfestem Kunstleder, Rückenlehne von -5° bis + 45° mit Gasdruckfeder stufenlos verstellbar, stabile Kunststoff-Armlehne, vorne offen für optimale Beinfreiheit, sichere Kopflagerung mit vorgestellter und höhenverstellbarer Kopfstütze, stufenlose Sitzhöhenverstellung von ca. 46 cm bis 66 cm mit mechanischer Hydraulikpumpe, einfache Patientenpositionierung durch 360° Drehbereich um die eigene Achse, mittels Fußhebel einfach in jeder Höhen- und Drehposition arretierbar, die Positionierung der klappbaren Fußstütze (optional) erfolgt synchron zur Neigung der Rückenlehne, pulverbeschichtete Bodenplatte mit Gummi-Kantenschutz, desinfektionsmittelbeständige Kunstleder-Farbkombination.

Anwendungsorgan: Positionierung des gesamten Patienten

Anwendungsdauer: Vorübergehend (bis 60 Minuten)

Anwendungsumgebung: In Kliniken und Praxen bei HNO-Ärzten und Phoniatern. Die Anwendung des Patientenstuhls darf nur durch medizinisches Fachpersonal durchgeführt werden.

Kontraindikation: Nicht als Dreh- bzw. Dreh-Pendel-Stuhl zur Nystagmus-Prüfung geeignet, nicht für Patienten mit mehr als 150 kg Körpergewicht, Rückenlehnen-Neigung nur bei am Boden verschraubten Stühlen, nicht zur Positionierung des Patienten in Schocklage geeignet (komplett horizontal)

Das Produkt ist: Nicht aktiv

Sterilität: Nicht steril

Einmalprodukt / Wiederaufbereitung: Kein Einmalprodukt

1.4 Lieferumfang

Dieser ATMOS-Patientensstuhl wurde vor dem Versand einer eingehenden Funktionsprüfung unterzogen und sorgfältig verpackt.

Bitte vergleichen Sie dennoch sofort nach Erhalt den Inhalt der Sendung auf Vollständigkeit (siehe Lieferschein).



1.5 Transport und Lagerung

- Nach Transport bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt muss das Gerät vor der Erst-Inbetriebnahme bis zu sechs Stunden bei Raumtemperatur stehengelassen werden. Ist das Gerät **nicht** akklimatisiert, darf es nicht betrieben werden.
- Transportieren Sie das Produkt nur in einem Versandkarton, der gepolstert ist und ausreichend Schutz bietet.
- Falls Sie Transportschäden feststellen:
 - Dokumentieren und melden Sie Transportschäden.
 - Senden Sie das Gerät an ATMOS, siehe Kapitel „6.2 Gerät einsenden“ auf Seite 11.

Umgebungsbedingungen:

Transport / Lagerung: -20...+50 °C
5...90 % Luftfeuchte ohne Kondensation
bei Luftdruck 700...1060 hPa

Betrieb: +5...+35 °C
20...80 % Luftfeuchte ohne Kondensation
bei Luftdruck 700...1060 hPa

1.6 Erklärung der Bildzeichen



Wichtige Informationen!

SN Seriennummer



Achtung, Gebrauchsanweisung beachten!

REF Bestellnummer



Das CE-Prüfzeichen zeigt an, dass dieses Produkt den einschlägigen Anforderungen der EU-Richtlinien entspricht.



Herstellungsdatum



Sicherheitshinweise

- Um den sicheren Betrieb des Stuhles zu gewährleisten, muss der ATMOS® Chair 21 P am Boden festgeschraubt werden.
- Sowohl zum Ein- und Ausstieg des Patienten als auch zu Untersuchungsbeginn (nach der Positionierung des Patienten), muss das Drehgelenk arretiert werden (Multifunktionshebel in höchste Position = Dreharretierung).
- Achten Sie darauf, dass Ihr Patient mittig auf der Sitzfläche sitzt. Dauerhafte einseitige Belastung des Sitztellers kann das Polster beschädigen.
- Es bestehen keine Gewährleistungsansprüche bei Schäden, die durch die Verwendung von Fremdzubehör oder Fremdverbrauchsmaterial entstanden sind.
- ATMOS garantiert weder eine fehlerfreie Funktion, noch haftet ATMOS für Personen- und Sachschäden, wenn:
 - keine Original-ATMOS-Teile verwendet werden,
 - die Verwendungshinweise dieser Gebrauchsanweisung missachtet werden,
 - Montage, Neueinstellungen, Änderungen, Erweiterungen und Reparaturen durch nicht von ATMOS autorisierte Personen durchgeführt wurden.
- Die in den technischen Daten (Kapitel 9.0) angegebenen Umgebungsbedingungen sind zu beachten.
- Vor der Anwendung soll eine Sichtkontrolle durchgeführt werden. Bei defekten Teilen darf der ATMOS® Chair 21 P nicht verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Servicetechniker.
- Bitte beachten Sie, dass der ATMOS® Chair 21 P nicht am Bedienhebel angehoben bzw. transportiert werden darf.



Bild 1. ATMOS® Chair 21 P mit wählbarer Option Fußstütze starr

3.1 Bedienungselemente

- ❶ Kopfstütze
- ❷ Hebel für Rückenlehnenverstellung
- ❸ Hebel für Höhenverstellung
- ❹ Fußstütze starr (Option)



Bild 2. Bohrungen zur Befestigung der Bodenplatte

3.2 Befestigung des Patientenstuhles

- ❶ Um den sicheren Betrieb des Stuhles zu gewährleisten, muss der ATMOS® Chair 21 P am Boden festgeschraubt werden.

Der Stuhl wird mit Hilfe des beigelegten Befestigungssatzes verankert. Hierzu sind die Abdeckstopfen aus den Befestigungsbohrungen zu entfernen und die Bodenplatte mit den Dübeln und Schrauben am Boden (Bild 2) zu befestigen.



Bild 3. Befestigung der Fußstütze

3.3 Montage Fußstütze

Die Fußstütze wird mit zwei Imbusschrauben mit Hilfe des beigelegten Imbusschlüssels von unten an der Sitzfläche befestigt. Die Langlöcher in der Montageplatte der Fußstütze erlauben eine individuelle Positionierung.

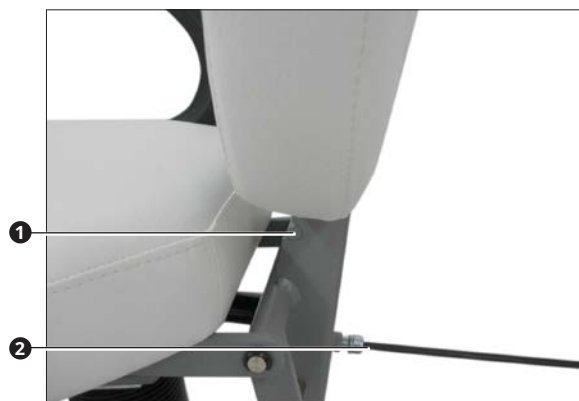


Bild 4. Befestigung der Rückenlehne

3.4 Befestigung der Rückenlehne

Die Rückenlehne in die vorgesehene Öffnung schieben, durch leichtes Kippen nach vorne runden Bolzen (1, Bild 4) einrasten und mit Zylinderschraube M 8x20 und Federscheibe Ø 8,1 festziehen (2, Bild 4).



Bild 5.

1 Klemmschraube

3.5 Einstellen der Kopfstütze

Die Kopfstütze kann durch Drehen der Schraube (1, Bild 5) auf die gewünschte Höhe eingestellt werden.

Es besteht die Möglichkeit, die Kopfstütze in zwei unterschiedlichen Positionen auszurichten.

Die Kopfstütze kann komplett nach hinten umgeklappt und durch Herausziehen aus der Halterung gedreht werden (Bild 6).



Bild 6. Drehen der Kopfstütze

3.6 Entfernen der Kopfstütze

Die Kopfstütze kann nach oben aus der Halterung herausgezogen werden.



Bild 7.

➊ Multifunktionshebel

4.1 Patient positionieren

- ➊ Achten Sie darauf, dass Ihr Patient mittig auf der Sitzfläche sitzt. Dauerhafte einseitige Belastung des Sitztellers kann das Polster beschädigen.

4.2 Einstellen der Sitzhöhe

Sowohl beim Ein- als auch beim Ausstieg des Patienten, muss der Stuhl in die unterste Position gefahren und das **Drehgelenk** arretiert werden (Multifunktionshebel in höchste Position = Dreharretierung).

- Durch pumpende Abwärtsbewegungen des Multifunktionshebels (➊, Bild 7) wird die Stuhlhöhe verstellt.
- Bei gewünschter Sitzhöhe den Stuhl arretieren (Multifunktionshebel in höchste Position = Sitzhöhenarretierung).
- Der Stuhl kann durch vollständiges Durchtreten des Multifunktionshebels über den spürbaren Widerstand hinaus in seine niedrigste Position abgesenkt werden.

4.3 Drehen des Stuhloberteiles

Das Stuhloberteil lässt sich mit dem Patienten komplett drehen, indem man den Multifunktionshebel aus seiner höchsten Position (Dreharretierung) in die erste Raststellung oder gegebenenfalls etwas tiefer bis zum vollständigen Lösen der Bremse bringt. Der Patient kann nun mit dem Stuhloberteil in die gewünschte Richtung gedreht werden. Bringen Sie anschließend den Multifunktionshebel ganz nach oben in Dreharretierung.

4.4 Verstellen der Rückenlehne

- Durch Drücken des Hebels (➊, Bild 8) in Richtung Rückenlehne, kann diese in die gewünschte Position gebracht werden.
- Nach Loslassen des Hebels geht dieser in die Ausgangsstellung zurück und die Rückenlehne ist arretiert.

- ➊ Bei Betätigung des Hebels in Richtung Rückenlehne bringt der eingebaute Gasdruckdämpfer die Lehne selbständig von der Rücklage in die senkrechte Position zurück.

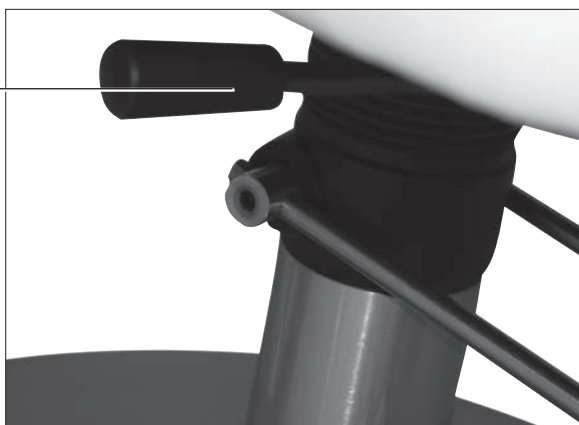


Bild 8.

➊ Hebel für Rückenlehnenverstellung

5.1 Grundsätzliches zu Reinigung und Desinfektion


Vor der Reinigung

Medizinische Stühle wie der ATMOS® Chair 21 P müssen stets betriebs- und funktionssicher sein.

- ☞ Die beschriebenen Maßnahmen zum Reinigen und Desinfizieren ersetzen nicht die jeweils für den Betrieb gültigen Vorschriften!
- Zur Desinfektion eignen sich alle in Kapitel 5.3 und 5.4 „Empfohlene Desinfektionsmittel“ aufgeführten Oberflächen- und Polsterdesinfektionsmittel.
- ☞ Die Konzentrationsangaben und Hinweise des jeweiligen Herstellers müssen grundsätzlich beachtet werden!
- Verwenden Sie **keine**
 - Desinfektionsmittel mit organischen oder anorganischen Säuren oder Basen, da diese Korrosionsschäden verursachen können.
 - Desinfektionsmittel mit Chloramiden, Phenolderivaten oder anionischen Tensiden, da diese bei den verwendeten Kunststoffen Spannungsrisse verursachen können.

5.2 Reinigung und Desinfektion der Geräteoberfläche und Polster

- Die Oberflächen des ATMOS® Chair 21 P sind beständig gegen alle unter 5.3 und 5.4 aufgeführten empfohlenen Desinfektionsmittel. Dennoch können nach längerer Nutzungsdauer unter Umständen leichte Verfärbungen entstehen.
- Flüssigkeiten wie Blut müssen sofort abgewischt werden, um Flecken zu vermeiden.
- Das Gerät selbst kann mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch abgewischt werden.

 Verwenden Sie keine aggressiven oder schleifenden Reinigungsmittel. Für das Polster kann auch der handelsübliche Trockenschaum verwendet werden.

Um das Bezugsmaterial geschmeidig zu halten wird die wöchentliche Anwendung einer handelsüblichen Pflege für Kunstleder empfohlen.

5.3 Empfohlene Oberflächendesinfektionsmittel

- Die Oberflächen des ATMOS® Chair 21 P können mit Desinfektionsmitteln gereinigt / abgewischt werden, die folgende aktive Inhaltsstoffe haben: QAV (quartäre Ammoniumverbindung)

5.4 Empfohlene Polsterdesinfektionsmittel

Desinfektionsmittel	Inhaltsstoffe	(in 100 g)	Hersteller
ATMOS® Green & Clean SK (Anwendungslösung)	Dialkyldimethylammoniumchlorid	< 1 g	Metasys, Rum (Österreich)
	Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid	< 1 g	
	Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid	< 1 g	



Wartung, Reparaturen und wiederkehrende Prüfungen dürfen nur Personen durchführen, die entsprechende Sachkenntnisse besitzen und mit dem Produkt vertraut sind. Für die genannten Maßnahmen muss die Person über die notwendigen Prüfvorrichtungen und Original-Ersatzteile verfügen.

ATMOS empfiehlt: Beauftragen Sie einen autorisierten ATMOS-Servicepartner. So können Sie sicher sein, dass Reparaturen und Prüfungen fachgerecht durchgeführt werden, Original-Ersatzteile verwendet werden und Gewährleistungsansprüche erhalten bleiben.

6.1 Wiederkehrende Prüfungen

- Befolgen Sie die landesspezifischen Vorgaben bezüglich regelmäßiger Prüfungen.
- ATMOS garantiert weder eine fehlerfreie Funktion, noch haftet ATMOS für Personen- und Sachschäden, wenn:
 - keine Original-ATMOS-Teile verwendet werden,
 - die Verwendungshinweise dieser Gebrauchsanweisung missachtet werden,
 - Montage, Neueinstellungen, Änderungen, Erweiterungen und Reparaturen durch nicht von ATMOS autorisierte Personen durchgeführt wurden.
- Es bestehen keine Gewährleistungsansprüche bei Schäden, die durch die Verwendung von Fremdzubehör oder Fremdverbrauchsmaterial entstanden sind.

6.2 Gerät einsenden

- Reinigen und desinfizieren Sie Produkt und Zubehör gemäß der Gebrauchsanweisung.
- Legen Sie verwendetes Zubehör dem Produkt bei.
- Füllen Sie das Formular QD 434 „Warenreklamation / Rücklieferschein“ und den zugehörigen **Dekontaminationsnachweis** aus.
- Das Formular liegt dem Produkt bei und wird auf www.atmosmed.com bereitgestellt.
- Verpacken Sie das Produkt gut gepolstert mit einer geeigneten Verpackung.
- Legen Sie das Formular QD 434 „Warenreklamation / Rücklieferschein“ mit dem zugehörigen **Dekontaminationsnachweis** in eine Versandtasche.
- Kleben Sie die Versandtasche außen auf die Verpackung.
- Senden Sie das Produkt an ATMOS oder Ihren Händler.



Der ATMOS® Chair 21 P wurde im Werk einer eingehenden Güteprüfung unterzogen. Sollte dennoch einmal eine Störung auftreten, rufen Sie bitte einen ATMOS Servicetechniker.

Fehlersymptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Stuhl lässt sich in der Höhe nicht verstellen	Hubsäule defekt	Hubsäule austauschen - nur durch ATMOS Servicetechniker
Stuhl geht bei Belastung nach unten	Hubsäule defekt	Hubsäule austauschen - nur durch ATMOS Servicetechniker
Rückenlehne lässt sich nicht verstellen	Gasdruckfeder defekt	Hubsäule austauschen - nur durch ATMOS Servicetechniker



8.1 Optionen

Bezeichnung.....	REF
Fußstütze, starr, aus silberfarbigem Metallrohr und Hartgummi	503.0731.0

8.2 Ersatzteile

Rückenlehne komplett weiss/taubenblau.....	503.0712.0
Rückenlehne komplett basic/taubenblau	503.0713.0
Schraube zylinder Innenkant 8 x 20	051.0087.0
Scheibe 8,4 form-b.....	053.0012.0
Sitzfläche gepolstert weiss	503.0714.0
Sitzfläche gepolstert basic	503.0715.0
Schraube zylinder Innenkant 6 x 45	051.0131.0
Scheibe 6,4 form-b.....	053.0006.0
Kopfstütze komplett.....	503.0723.0
Armlehne komplett	503.0720.0
Schraube zylinder Innenkant 6 x 30	051.0083.0
Schraube zylinder Innenkant 6 x 20	051.0082.0
Scheibe 6,4 form-b.....	053.0006.0
Grundplatte	503.0726.0
Schraube senk m 8x25	051.0387.0
Hubzylinder	503.0716.0
Schraube zylinder Innenkant 6 x 20	051.0082.0
Gleitlager iglidur g	503.0718.0
Gleitlager iglidur g	503.0717.0
Achse für Rückenlehne	503.0721.0
Achse für Gasdruckfeder h. Chair	503.0724.0
Achse für Gasdruckfeder v. Chair	503.0725.0
Sicherungsscheibe 8.....	053.0110.0
Sicherungsscheibe 6	053.0109.0
Hebelauslösung Gasdruckfeder	503.0727.0
Gasdruckfeder	503.0728.0
Befestigungsplatte.....	503.0722.0
Sitzträger komplett	503.0710.1
Halter Rückenlehne komplett.....	503.0711.1
Klebepads	000.0959.0

Höhenverstellung	Manuell, Pumphydraulik
Umgebungsbedingungen Transport/Lagerung	
• Temperatur	-20...+50 °C
• Luftfeuchte ohne Kondensation	5...95 %
• Druck	700...1060 hPa
Umgebungsbedingungen Betrieb	
• Temperatur	+5...+35 °C
• Luftfeuchte ohne Kondensation	30...95 %
• Druck	700...1060 hPa
Sitzhöhe	46 - 66 cm
Rückenlehnen-Verstellung	50° (-5° ... 45°)
Drehung Stuhloberteil	360°
Abmessungen (HxBxT)	155 x 58 x 64 cm
Sitzfläche (Durchmesser)	48 cm
Rückenlehne (HxB)	58 x 54 cm
Beinauflage (HxB)	34 x 33 cm
Kopfstütze (HxB)	19 x 28 cm
Durchmesser Standfuß	60 cm
Gewicht	28 kg
Max. Patientengewicht	150 kg
Wiederkehrende Prüfungen	Befolgen Sie die landesspezifischen Vorgaben bezüglich regelmäßiger Prüfungen.
Klassifizierung gemäß Anhang IX EG-Richtlinie 93/42/EWG	I
CE-Kennzeichnung	CE
GMDN-Code	10 - 794
UMDNS-Code	10794
Ident-Nr. (REF)	503.0730.0 weiß / taubenblau 503.0730.0 basic / taubenblau

Stand der technischen Daten: 01.03.2018

10.1 Überprüfung von ATMOS Geräten

Die ATMOS Geräte sind, bei Anwendung entsprechend der Bedienungsanleitung, wartungsfrei.

Eine regelmäßige gründliche Reinigung und Desinfektion des Stuhles und der Anwendungsteile, bzw. der Betrieb des Gerätes entsprechend der Bedienungsanleitung, wird vorausgesetzt.

10.2 Entsorgung

- Der ATMOS® Chair 21 P beinhaltet keine Gefahrgüter.
- Das Gehäusematerial ist voll recyclingfähig.
- Gerät und Zubehör sind vor der Entsorgung zu dekontaminieren.
- Achten Sie auf eine sorgfältige Materialtrennung.
- Beachten Sie länderspezifische Entsorgungsvorschriften (z. B. Abfallverbrennung).



Vor der Entsorgung bzw. vor dem Transport müssen alle Teile, die mit Patienten in Berührung gekommen sind gründlich gereinigt, desinfiziert werden. Das Gerät selbst muss einer Oberflächendesinfektion unterzogen werden.

Entsorgung in der EU

Bei dem voran beschriebenen Geräte handelt es sich um ein hochwertiges medizinisches Produkt mit hoher Lebensdauer. Nach dem Ende eines Lebenszyklus muss das Gerät einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Laut den EU-Richtlinien (WEEE und RoHS) darf das Gerät nicht über den allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die im jeweiligen Land geltenden Gesetze und Vorschriften, welche für die Entsorgung von Altgeräten bestehen.

Entsorgung in der BRD

Um den ordnungsgemäßen Entsorgungsvorgang zu gewährleisten, überlassen Sie das Altgerät entweder ihrem zuständigen Fachhändler oder lassen es ATMOS MedizinTechnik zur Entsorgung zukommen.





MedizinTechnik

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Deutschland
Tel: +49 7653 689-370
atmos@atmosmed.de

www.atmosmed.com